



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ZHIVASEPT RAPID E80 ЖИВАСЕПТ РАПИД Е80



Готов за употреба препарат на базата на 80% етанол за бърза дезинфекция на малки и труднодостъпни повърхности.

Приложение

Живасепт рапид Е80 е предназначен за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения, предприятия за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и промишлеността, както и за бита.

Свойства

Живасепт рапид Е80 е готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди, феноли и четвъртични амониевы съединения. Представлява силен биоцид на основата на етанол с широк спектър на действие при кратка експозиция. Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различни материали.

Аерозолната форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно достъпни повърхности.

Третираните повърхности и предмети могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

Външен вид:	Прозрачна течност с приятен аромат
pH	5.5 – 7.0

Състав на препарата

Всеки 100 g Живасепт рапид Е80 съдържат:

Активни вещества:

80 g Етанол (CAS 64-17-5)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция.



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Спектър на действие

Живасепт рапид Е80 притежава бактерицидно (вкл.MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), пълно вирусоцидно (*вируси* с и без обвивка) и фунгицидно действие.

Микробиологична активност	Метод на тестване	Експозиция
Бактерицидно действие (<i>S. aureus</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>E.hirae</i> , <i>E.coli</i>)	EN 13727	30 sec
Фунгицидно действие (<i>C.albicans</i> , <i>A.Brasiliensis</i>)	EN 13624	30 sec
Микобактерицидно (туберкулоцидно) (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	EN 14348	60 sec
Микобактерицидно (туберкулоцидно) (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	EN 14563	120 sec
Вирусоцидно действие (<i>Adeno</i> , <i>Vaccinia</i> , <i>Noro</i> , <i>Polio</i>)	EN 14476	60 sec

Указания за употреба

Живасепт рапид Е80 представлява готов за употреба разтвор. Прилага се чрез напръскване на третираните повърхности, посредством спрей помпата на флакона от около 30 см разстояние, в съответствие с времето на експозиция (вж. таблица за приложение)

Таблица за приложение:

Обект на дезинфекция	Спектър на действие	Експозиция
Повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения, предприятия за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и промишленост.	Микобактерицидно	2 min
	Бактерицидно и фунгицидно	30 sec.
	Вирусоцидно и туберкулоцидно	1 min

При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности и предмети, същите не трябва да бъдат в близост до източници на запалване!

След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват незабавно, без изплакване с вода.



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Условия на съхранение

Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни и напитки, при температура < 30° C. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Предпазни мерки

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка:

Туба 5 л.

Срок на годност:

3 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com