



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел. 02/ 981 78 23

ALDESEPT MD

АЛДЕСЕПТ MD

**Концентриран алдехиден препарат за дезинфекция
на инвазивни и неинвазивни медицински
инструменти и апаратура**



CE 1639

Приложение

Алдесепт MD е предназначен за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински и стоматологични инструменти, медицинска апаратура и лабораторна стъклария.

Алдесепт MD може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полу-автоматични и напълно автоматични циркулационни процеси.

Свойства

Алдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробна активност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Притежава отлични почистващи свойства. Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали, които могат да бъдат третирани многократно без да бъдат повредени. Работните разтвори на препарата са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им. (Съхранявайте в затворен контейнер при стайна температура!)

Външен ви	безцветна ароматизирана течност
pH	4.5 - 5.5 (20°C)
Плътност	1.040 g/cm ³ (20°C)

Състав на препарата

Всеки 100 g Алдесепт MD съдържат:

Активни вещества:

- 7.5 g Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)
- 15.0 g Етилен диокси диметанол (CAS 3586-55-8)
- 2.0 g Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1)

Спомагателни вещества:

Изопропанол, инхибитор на корозия, парфюмна композиция, деминерализирана вода.



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Класификация:

Алдесепт МД отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за медицинските изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb .

Спектър на действие

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. *TBC*), вирусцидно, фунгицидно и спороцидно.

Микробиологична активност	Концентрация	Тест метод/Стандарт	Експозиция
Бактерицидна (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	1.0%	EN 14561	30 min
Фунгицидна (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	1.0%	EN 14562	30 min
Микобактерицидна (<i>M.terrae</i>)	1.0%	EN 14348	60 min
Вирусцидна (<i>Polio</i> , <i>Adeno</i> , <i>Noro</i>)	1.0%	EN 14476.	60 min
Спороцидна (<i>Clostridium difficile</i>)	5%	EN 17126	120 min



(GHS05)



(GHS 08)



(GHS 09)

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:

H302 – Вреден при поглъщане

H332 – Вреден при вдишване

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите

H334 – Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H315 – Предизвиква дразнене на кожата

H317 – Може да причини алергична кожна реакция

H400 – Силно токсичен за водните организми

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P261 Избягвайте вдишване на изпаренията

P280 Използвайте предпазни ръкавици от нитрилен каучук, предпазни очила, предпазна маска

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P302+P333+P313 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:

Потърсете медицински съвет/помощ.

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

Метод на приложение:



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Работният разтвор се приготвя с питейна вода. Налейте необходимото количество вода в съд и постепенно добавете нужното количество от концентрата. Разбъркайте. **Третиране чрез потапяне:** (разгледете максимално и разкрийте отворите на всички инструменти, доколкото е възможно и ги потопете в разтвора. Уверете се, че всички повърхности и отвори на инструментите са напълно покрити и оставете препаратата да действа). **Третиране чрез забърсване:** (Използвайте подходящо средство-кърпа, салфетка от нетъкан текстил или др., напоете го обилно с разтвора и забършете повърхността до пълно омокряне и оставете препаратата да действа).

След изтичане времето на експозиция, изплакнете с вода третиранияте инструменти и ги подсушете.

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция	Спектр на действие	Работен разтвор	Експозиция
Дезинфекция и почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия	Бактерицидно, фунгицидно	1.0 %	30 min
	Микобактерицидно, вирусцидно	1.0 %	60 min
	Спороцидно	5.0 %	120 min

Циркулационни процеси

Алдесепт MD е подходящ за всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни процеси съгласно инструкциите на производителите на дезинфекционни автомати. Препоръчително е в този случай ръчно почистване на медицинските инструменти преди дезинфекция.

Съвместимост с други материали:

Метали: алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий, хромиран месинг.

Синтетични материали: поливинилхлорид, полипропилен, полиетилен

Противопоказания: Да не се прилага върху порьозни, водо-неустойчиви материали и повърхност

Условия за съхранение

Да се съхранява в затворена оригинална опаковка, в сухи и добре проветриви помещения защитени от пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 40° C.

За повече подробности, вижте ИЛБ.

Внимание! Работните разтвори могат да се използват до 14 дни след приготвянето им.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки- съгласно указанията на местното законодателство. Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции в информационния лист за безопасност.

Опаковка:

(HDPE) флакони от 250 ml и 500 ml, бутилки 1000 ml, туби от 3 L и 5 L

Срок на годност: 3 години

ЖИВАС ООД

1592 София, Бул. „Асен Йорданов“ №14

Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

zhivas@techno-link.com

www.zhivas.com