



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ZHIVANEH MD

ЖИВАХЕКС MD

**готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция на
инвазивни и неинвазивни медицински инструменти, малки
ротационни стоматологични инструменти и повърхности на
медицински изделия**



CE 1639

Приложение

Живахекс MD е предназначен за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви инвазивни и неинвазивни медицински инструменти (вкл. дентални ротационни инструменти, борери и др.) и повърхности на медицински изделия и апаратура. Подходящ е за употреба в ултразвукови вани.

Свойства

Живахекс MD е готов за употреба разтвор не съдържащ алдехиди и феноли. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и хлорхексидин. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори за корозия и не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различните материали. Притежава почти нулев алергичен потенциал.

Външен вид: Бистра бледозелена течност с приятен аромат
pH 5.0 – 7.0

Състав на препарата:

Всеки 100 g Живахекс MD съдържат:

Активни вещества:

0.5 g	Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0)
60.0 g	Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, оцветител.

Класификация:

Живахекс MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за медицинските изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb .



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Спектър на действие:

ЖИВАХЕКС MD притежава бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусцидно действие.

Микробиална активност	Метод на изследване	Експозиция
Бактерицидно действие (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>E.coli</i> K12)	EN 14561 EN 13727	5 min
Фунгицидно действие (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	EN 14562 EN 13624	5 min
Туберкулоцидно действие (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 min
Вирусцидно действие	EN 14476	5 min

Указания за употреба

Живахекс MD представлява готов за употреба разтвор. Прилага се чрез:

- **напръскване** на третираната повърхност или медицински/стоматологичен инструмент до пълно омокряне. Време на въздействие – 5 минути.
- **потопяне** на медицински и стоматологични инструменти (дребни ротационни инструменти, борери и др.) в разтвора. Оставете дезинфектанта да действа 5 минути. Извадете от ваната и оставете да изсъхне.

Препоръчително е почистване на медицинските инструменти преди дезинфекция.

След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват незабавно, без изплакване с вода или подсушаване. За постигане на най-добър резултат, разтворът трябва да се сменя ежедневно.

Внимание! Да не се използва върху повърхности от полиметил метакрилат (плексиглас, акрилит). Може да предизвика потъмняване на повърхността.



(GHS 02)



(GHS 07)

Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност:

H226 - Запалими течности и пари

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H336 - Може да предизвика сънливост и световъртеж

Препоръки за безопасност:

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца

P210 - Да се пази от топлина, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P280 - Използвайте предпазни очила

P305+P351+P338-При контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинска помощ.

P304+P340 - При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането



ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Условия на съхранение

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, при температура от $<35^{\circ}\text{C}$. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Опаковка:

Флакони от 750 ml и 200 ml, бутилки от 1 L и туби от 3 L, 5 L и 10 L.

Срок на годност:

3 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14

Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507

zhivas@techno-link.com

www.zhivas.com